


**DiaPrint Gewebekassetten***Vorgestapelte Gewebekassetten mit Band*

**Hersteller: Diapath S.p.A.** Via Savoldini, 71 – 24057 Martinengo (BG) – Italien – Tel. +39 0363 986411  
 Fax +39 0363 948000 www.diapath.com info@diapath.com

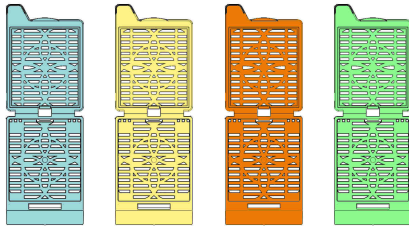

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung
GP07001	DiaPrint Gewebekassetten	Weiß	1000 St.
GP07002	DiaPrint Gewebekassetten	Grün	1000 St.
GP07003	DiaPrint Gewebekassetten	Hellblau	1000 St.
GP07004	DiaPrint Gewebekassetten	Orange	1000 St.
GP07005	DiaPrint Gewebekassetten	Rosa	1000 St.
GP07006	DiaPrint Gewebekassetten	Gelb	1000 St.
GP07007	DiaPrint Gewebekassetten	Beige	1000 St.

\* Beispiel: Weitere Farben sind erhältlich

**Beschreibung**

Vorgestapelte Kassetten mit Band, Deckel mit robustem Verschluss, ideal für die Bearbeitung und Einbettung histologischer Proben, mit AP Itineris Druckern kompatibel.

**Neuer Druckbereich für hervorragende Ergebnisse**

**Material**

Hochwertiges Acetalharz

**Funktionelle Eigenschaften**

- Beständig gegenüber den in der Histologie benutzten Lösungsmitteln
- Temperaturbeständig
- Schnappverschluss und Verriegelungssystem, das ein unerwünschtes Öffnen des Deckels verhindert
- Lochung auf dem Deckel, die die optimale Passage der Reagenzien unterstützt
- Öffnungsglasche links vorne für ein müheloses Öffnen der Kassette
- Deckel durch seitliches Ziehen abtrennbar
- Perfekter Sitz des Deckels auch nach mehrmaligem Öffnen, damit die Probe nicht verloren geht
- Neuer Druckbereich und bedruckbare Ecke für optimale Ergebnisse
- Außenabmessungen: 40 x 28 x 7 mm


**Gebrauchsanweisung**

Für die Aufbereitung nach dem Einlegen der Probe kontrollieren, ob der Deckel richtig geschlossen ist und die Kassetten in die chemischen Reagenzien legen

# DIAPATH

Zum Bedrucken folgende Anweisungen befolgen:

1. Das Band mit einer Hand halten und die Kassetten mit der anderen Hand in das Magazin einführen.
2. Die oberste Kassette mit dem Finger nach unten drücken und das schwarze Band mit der anderen Hand herausziehen.
3. Das Magazin in den Drucker einsetzen und den Druckvorgang in Gang setzen.

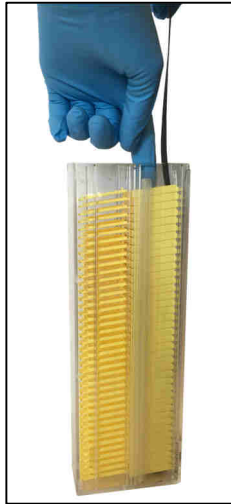

Um überschüssiges Paraffin nach dem Einbetten zu entfernen, wird empfohlen, die Vorderseite der Kassette auf eine warme Platte zu geben, dort ein paar Sekunden zu belassen (nicht reiben) und die betroffene Oberfläche mit Saugpapier abzutupfen

## Packungsgrößen

Die Kassetten sind mit Bändern zu jeweils 40 Stück zusammengefasst, jede Packung enthält 25 Reihen, das ergibt insgesamt 1000 Stück.

## Gebrauchsanweisung

Zur Vermeidung von Fehlern sollte das Medizinprodukt von erfahrenem Fachpersonal gehandhabt werden. Das Medizinprodukt ist ausschließlich für den Fachgebrauch bestimmt. Die Arbeitsschutzrichtlinien sind entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften umzusetzen. Die für die Diagnose verwendeten Instrumente müssen für die Labordiagnostik geeignet sein. Die Diagnose darf ausschließlich durch befugtes, kompetentes und geschultes Personal gestellt werden.

## Lagerung

Das Medizinprodukt gemäß den Angaben auf dem Etikett lagern. Bei sachgemäßer Lagerung in unversehrter Verpackung ist das Medizinprodukt bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum stabil. Nicht nach dem Verfalldatum verwenden.

Wird das Medizinprodukt nicht gemäß den Angaben gelagert, kann seine Leistung beeinträchtigt werden. Es muss dann vom Anwender getestet werden.

## Entsorgungshinweise

Das abgelaufene und/oder unverwendete Medizinprodukt muss gemäß den geltenden örtlichen Abfallbestimmungen auf Basis der auf dem Etikett angegebenen Gefahreneinstufung und nach Abwägung eventuell vorhandener Kontaminationen entsorgt werden. In bestimmten Fällen kann eine analytische Beurteilung erforderlich sein, um die korrekte Einstufung des Abfalls und die entsprechenden gefahrenrelevanten Eigenschaften zu bestimmen.

## Zeichenerklärung Etikettierung



Chargen-Nr.



Hersteller



Temperaturgrenzen Lagerung



Artikelnummer



Verfalldatum



Medizinprodukt zur In-vitro-Diagnostik



Lichtempfindlich